

**CONTROLLO TOTALE  
PER UN INTERVENTO TEMPESTIVO**

**FIDENS<sup>®</sup> CLINIC PRO**   
SENSORE PRESENZA ALLETTATI

**FIDENS<sup>®</sup> CLINIC** è dedicato alle  
case di cura e alle strutture ospedaliere  
per consentire di **monitorare** tutte le  
**persone allettate** nei reparti di assistenza.



# COME SI PRESENTA E COME FUNZIONA

I componenti **FIDENS® CLINIC** sono:

- ✓ TRASDUTTORE
- ✓ TRASMETTITORE
- ✓ FIDENS CONSOLLE
- ✓ FIDENS PHONE

Dopo aver programmato la **FIDENS CONSOLLE**, i trasmettitori si collegano in automatico tramite Wi-Fi. L'interfaccia amministrativa permette la configurazione e la gestione delle funzionalità del sistema.

**FIDENS CONSOLLE** comunica in tempo reale con **FIDENS PHONE** e permette al personale, registrato come attivo nei gruppi operativi, il costante controllo e l'opportunità di un immediato intervento in caso di allarme, nonché di attivare richieste di assistenza, supporto e chiamate d'urgenza.

The screenshot displays the FIDENS CLINIC PRO dashboard. The top navigation bar includes icons for FIDENS (5), DISARMATI, EMERGENZE, and ASSISTENZE. The main interface is divided into four quadrants: GESTIONE PERSONALE, GESTIONE REPARTI, REGISTRO EMERGENZE, and REGISTRO ASSISTENZE. A central yellow notification box with a red '1' icon and a share symbol reads 'GESTIONE SENSORI LETTO' and '3 NUOVO SENSORE RILEVATO'. A secondary window titled 'GESTIONE SENSORI | Collegati - 5 - Armati - 5' is overlaid, showing a table of active sensors with a red '2' icon in the top right corner.

ID	DESCRIZIONE	STATUS
FC12345566		COLLEGATO
FC12345678	PIANO 2° GERIATRIA - CAMERA: 205 - PAZIENTE: M.ROSSI	COLLEGATO
FC22345679	PIANO 2° GERIATRIA - CAMERA: 207 - PAZIENTE: GVERDI	COLLEGATO
FC32345689	PIANO 3° TRAUMATOLOGIA - CAMERA: 310 - PAZIENTE: R.BIANCHI	COLLEGATO
FC42345699	PIANO 3° CHIRURGIA - CAMERA: 325 - LETTO: 4	COLLEGATO
FC52345699	PIANO 3° CHIRURGIA - CAMERA: 325 - LETTO: 5	COLLEGATO

**FIDENS CONSOLLE** è in grado di rilevare automaticamente l'accensione di un nuovo trasmettitore **FIDENS**.



Il messaggio del nuovo dispositivo rilevato viene mostrato sulla DASHBOARD, **1** permettendo all'amministratore del sistema di proseguire con la configurazione di tutti i parametri necessari al suo corretto collegamento e funzionamento. **2**



**FIDENS® CLINIC** nasce grazie all'esperienza, ai risultati ottenuti con la progettazione e la realizzazione di **FIDENS® HOME**, lo strumento semplice e rivoluzionario che consente un monitoraggio non invasivo di persone allettate.

**FIDENS® CLINIC** ne estende le funzionalità dall'ambiente domestico a quello professionale delle cliniche, delle case di cura, degli ospedali e delle RSA.

Le nuove tecnologie hardware e software hanno reso possibile la creazione di un sistema che consente di monitorare tutte le persone allettate nei reparti di assistenza ed intervenire in caso di allarme.

**FIDENS CLINIC PRO**

FIDENS DISARMATI EMERGENZE ASSISTENZE

**GESTIONE SENSORE | FC12345566**

Codice identificativo FIDENS: FC12345566

Prima di proseguire a collegare il FIDENS, assicurarsi di avere creato il gruppo operatori nella sezione **GESTIONE REPARTI**

Utilizza il menu a tendina [1] per associare il FIDENS al gruppo di operatori e i 3 campi [2,3,4] descrittivi per localizzarlo in base alla struttura in cui è installato.

Qui sotto l'esempio di come verrà visualizzato sul dispositivo in caso di **ALLARME - RICHIESTA ASSISTENZA**

1) PIANO 2° GERIATRIA  
2) Camera: 205  
3) Letto: 2A  
4) Paziente: M.ROSSI

DISARMATO  
ARMATO

SCOLLEGA E ARCHIVIA

MODIFICA

**PIANO 2° GERIATRIA  
CAMERA: 205  
LETTO: 2A  
PAZIENTE: M.ROSSI**


MARIO ROSSI  
14:12 14/03/2016 | info@fidens.it | INFO LINE +39 0323 869393

by **BETA**  
ELECTRONICS

**COLLEGA FIDENS:** permette di collegare e configurare i sensori, associare il gruppo operatori in base al reparto, stanza o piano in cui è stato posizionato e inserire i dettagli informativi che saranno visualizzati in caso di allarme. **3**

I dettagli inseriti saranno visualizzati in occasione di ogni allarme, sul **FIDENS PHONE** degli operatori, risultando indispensabili per un intervento idoneo, mirato e tempestivo. **4**

# IL PRODOTTO VISTO DA CHI LO HA PROGETTATO

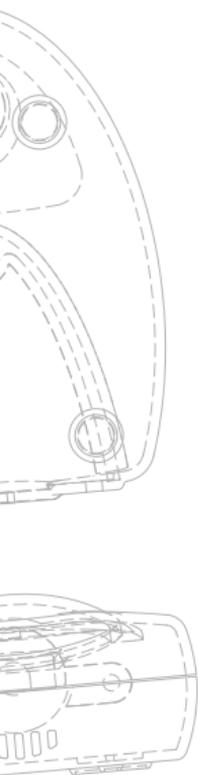

La progettazione di **FIDENS®** prende origine da una équipe di ingegneri accomunati dalla impegnativa e drammatica esperienza familiare quotidiana di assistenza a malati di Alzheimer. L'innovativo prodotto nasce da oltre tre anni di accurati test e analisi condotte su pazienti allettati affetti da Alzheimer. I risultati sono stati eccezionali: grazie a questo strumento, è possibile razionalizzare considerevolmente l'assistenza al malato, oltre a migliorare in modo netto la qualità della vita di chi lo assiste e ne ha cura.

**FIDENS®** è studiato per supportare il **MONITORAGGIO NON INVASIVO DEL MALATO** sia durante le ore diurne che in quelle notturne, in tutte le fasi di evoluzione della malattia con conseguente peggioramento dello stato di salute.



**FIDENS PHONE** è il dispositivo che viene affidato al personale operativo. Dopo l'inserimento del codice di autenticazione **5** il personale potrà selezionare il/i gruppi operativi **6** del proprio turno di lavoro e potrà così monitorare gli apparecchi **FIDENS** associati.

Si attiverà l'allarme, ogni volta che il malato si alzerà dal letto di degenza. In questo caso il trasmettitore allenterà la **CONSOLLE 7** che registrerà l'evento e invierà il messaggio di allarme ai **FIDENS PHONE** associati al gruppo operativo. Ad allarme ricevuto il personale di competenza viene avvisato dal proprio **FIDENS PHONE. 8**


# VALUTA Istantaneamente LA GRAVITÀ DELL'EMERGENZA

La nuova versione di **FIDENS® CLINIC** è accessoriata con videocamera di sicurezza, associabile a più trasmettitori per stanza tramite la **CONSOLE**. Il video trasmesso sul **FIDENS PHONE**, del relativo gruppo operativo, permetterà di valutare la gravità dell'emergenza.

La **FIDENS CAMERA** è implementabile su tutti i **FIDENS® CLINIC**, sui sistemi già installati sarà necessario un aggiornamento del software della **CONSOLE** e dei **FIDENS PHONE**.



Immagine a scopo illustrativo

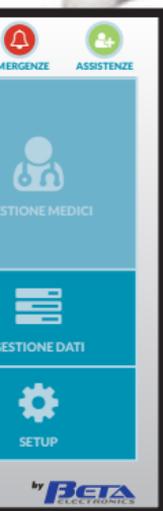

Sui sistemi con **FIDENS CAMERA** installata, è possibile visualizzare sul **FIDENS PHONE** circa 8 secondi di video, in tempo reale, del trasmettitore che ha inviato l'allarme **9**.

Questo permette di valutare la gravità della situazione e aiuta l'operatore nelle scelte da fare, prima di intervenire con urgenza oppure constatare che il paziente si sia semplicemente allontanato dal suo letto di degenza, senza alcuna conseguenza.

La **FIDENS CAMERA** è in grado di monitorare più trasmettitori, associandoli tramite **CONSOLE**, il numero dipende dalla disposizione dei letti e dalla posizione della videocamera.

**FIDENS® CLINIC**  
è disponibile anche  
in versione **BASIC**.

La versione **BASIC** ha le stesse  
funzionalità della versione **PRO**,  
ad esclusione dei servizi **SOS  
EXTRA** e **RACCOLTA DATI**.



**FIDENS® CLINIC BASIC** è un sistema che snellerà  
e razionalizzerà i processi di monitoraggio e  
gestione delle degenze e del personale attivo,  
progettato e dedicato alle strutture assistenziali  
più piccole.

**RISPONDE ALLE RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO  
DELLA SALUTE PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI AVVERSI.**



Ad accettazione e presa in carico della richiesta d'allarme si modifica  
l'interfaccia grafica che mostrerà i dettagli dell'intervento. **10**  
L'operatore che è intervenuto, è in grado di richiedere ulteriore  
assistenza **11** allo stesso GRUPPO OPERATORI, chiamare il medico di  
turno, il 118 oppure potrà definire il FINE EMERGENZA. **12**  
**13** SOS EXTRA: consente la generazione di un allarme indipendente,  
direttamente dal **FIDENS PHONE**.

Gli eventi e le azioni saranno registrati dalla **FIDENS CONSOLLE** e  
grazie alla **RACCOLTA DATI** sarà possibile disporre di una  
documentazione storica e statistica degli interventi.

# SIETE INTERESSATI A TESTARE L'EFFICIENZA DI FIDENS® CLINIC, NELLA VOSTRA STRUTTURA?

Il team tecnico di **FIDENS**, vi raggiungerà con la **DEMO** del nostro prodotto, perfettamente funzionante senza limitazioni e sarà in grado di simulare e mostrarvi il funzionamento del sistema, come se fosse installato.

Una grande occasione, completamente gratuita e senza impegno, vi permetterà di apprezzare le qualità e i miglioramenti che sarà in grado di apportare al lavoro quotidiano dei vostri operatori.



Contattateci  
per una  
dimostrazione  
gratuita

**INFO LINE**  
**+39 0323 869393**





PATENTED

**FIDENS<sup>®</sup>**, rispondente a tutte le certificazioni di prodotto ed è totalmente ideato, progettato, assemblato e collaudato in Italia.



Contattateci per una  
dimostrazione gratuita

[www.fidens.it/clinic](http://www.fidens.it/clinic)

INFO LINE

[info@fidens.it](mailto:info@fidens.it)

**+39 0323 869393**



FIDENS

**FIDENS<sup>®</sup>** è un prodotto  
di BETA ELECTRONICS Srl

Sede Operativa: C.so Milano, 180  
28883 GRAVELLONA TOCE (VB) - ITALY

by **BETA**  
ELECTRONICS